

STERANIOS 2%

STERANIOS 2% NG - STERANIOS 2% ECS

CE
0459

Désinfectant
de Haut Niveau



- Solution prête à l'emploi : absence d'activateur
- Actif sur bactéries, levures, moisissures, virus et mycobactéries en 10 minutes
- Actif sur spores de bactéries en 1 heure
- Vérification de l'efficacité du bain par bandelette spécifique (toutes les 4 heures)

INDICATIONS

Désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux, matériel chirurgical et médical, matériel d'endoscopie et matériel thermosensible.

CARACTERISTIQUES

- Conservation du bain 7 jours (Conformement à la circulaire DGS 591 du 17/12/2003).
- Solution limpide de couleur verte.
- Actif sur *Helicobacter pylori*.
- Solution à 2% de Glutaraldéhyde tamponnée à pH6 (Citrates de sodium).
- STERANIOS 2% NG et STERANIOS 2% ECS sont formulés avec des composés qui limitent et contrôlent l'évaporation du glutaraldéhyde.
- Sporidie complète (5 log de réduction).
- Large compatibilité avec tout type de matériaux.
- Péréemption : 3 ans à partir de la date de fabrication.
- S'utilise en association à tout type de produit nettoyant pré-désinfectant.

PRÊT A
L'EMPLOI




STERANIOS 2%


STERANIOS 2% NG - STERANIOS 2% ECS

Désinfectant de Haut Niveau


MODE D'EMPLOI

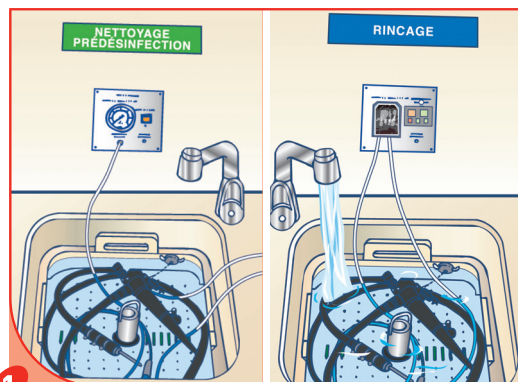


Etape de pré-désinfection : Nettoyer le dispositif médical avec un produit type ANIOSYME DD1, HEXANIOS G+R, ou ANIOSYME PLA II.
Rincer soigneusement.
Pour le matériel endoscopique : écouvillonner et irriguer.

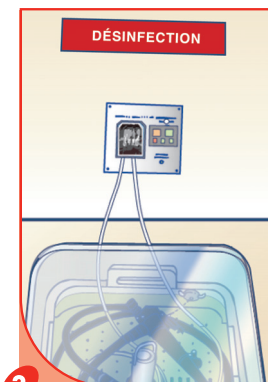

Etape de désinfection : verser la solution.
Couvrir le bac.
Temps de contact : 10 min. ou 1 heure selon l'activité recherchée.
Temps de conservation maximum du bain : 7 jours

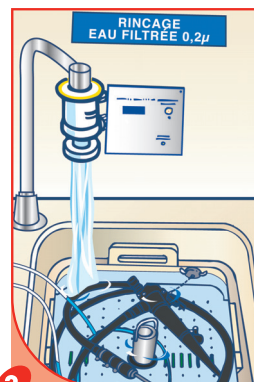

Rincer soigneusement le dispositif médical à l'eau stérile ou filtrée (0,2µm).
Pour le matériel endoscopique : extérieur et intérieur.

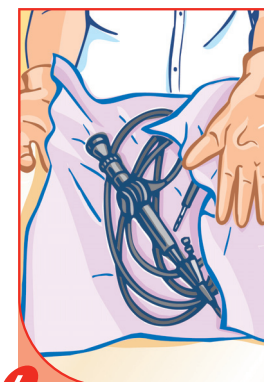

Essuyer avec un champ à usage unique.
Conserver le dispositif médical le plus aseptiquement possible jusqu'à nouvelle utilisation.

COMPOSITION QUALITATIVE

STERANIOS 2% est une solution de glutaraldéhyde à 2% (exprimé en matière active à 100%), tamponnée à pH 6 en présence d'un catalyseur d'effets de surface.
STERANIOS 2% NG et STERANIOS 2% ECS contiennent 2 composés qui, en association, limitent l'évaporation du glutaraldéhyde.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi (établies selon la Directive 99/45/CE et ses adaptations).
Stockage : de +5°C à +35°C.

CONDITIONNEMENTS

- 1 STERANIOS 2% 4 bidons de 5L.....Réf 382.034
- 2 STERANIOS 2% NG 4 bidons de 5L.....Réf 383.034
- 3 STERANIOS 2% ECS 4 bidons de 5L.....Réf 710.034

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Actif sur	Normes	Temps de contact
Bactéries	EN 1040, EN 13727, NF T 72-171 EN 14561	5 minutes
	Helicobacter pylori	10 minutes
Mycobactéries	Mycobacterium tuberculosis (B.K.)	5 minutes
	EN 14348 (M. terrae, M. avium) pr EN 14563 (M. terrae)	10 minutes
Levures / Moisissures	EN 1275,	10 minutes
	EN 13624, EN 14562	10 minutes
Virus	HIV-1, HBV, Herpès virus, BVDV (virus modèle HCV)	5 minutes
	EN 14476	10 minutes
Spores	NF T 72-230	1 heure
	T 72-301 (C. difficile)	30 minutes
	Mycoplasmes urogénitaux	5 minutes

